

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsanweisung, bitte sorgfältig lesen!

# Gleitgelen®

### Bestandteile

Dickflüssiges Paraffin, mittelkettige Triglyceride, Polyethylen,  $\alpha$ -Dodecyl- $\omega$ -hydroxypoly(oxyethylen)-4, Glycerolmonooleat, Poly(oxyethylen)-25-glyceroltrioleat.

### Produktinformationen

Gleitgelen ist ein fetthaltiges Gel (Lipogel) mit guten Gleiteigenschaften und einer guten Verträglichkeit für die Haut der Scheide und des männlichen Gliedes. Die Spermiovitalität wird durch Gleitgelen nicht beeinflusst. Gleitgelen enthält keine Konservierungs-, Farb- und Geruchsstoffe. Es lässt sich gut abwaschen und verursacht keine bleibenden Flecken in der Wäsche.

### Anwendungsgebiet

Gleitgelen wird angewendet zur Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Geschlechtsverkehr, wenn die Scheide zu trocken ist.

### Erläuterungen:

Ein Mangel an Scheidensekret beim Geschlechtsverkehr kann u. a. entstehen

- durch Stress;
- durch Abnahme der Sexualhormonproduktion bei Frauen ab dem 40. Lebensjahr;
- nach Operationen an der Scheide, der Gebärmutter oder den Eierstöcken.

Ist die Sekretbildung in der Scheide beim Sexualverkehr nicht möglich oder nur gering, dann bleibt die Scheide zu trocken. Dadurch ist das Gleitvermögen oft derart herabgesetzt, daß es beim Intimverkehr zu starker Schmerzempfindung, Verkrampfung und damit zu Angst und Abneigung kommen kann.

### Anwendungsweise

Gleitgelen wird vor dem Geschlechtsverkehr mit dem Finger in dünner Schicht im Scheideneingang oder direkt auf dem männlichen Glied verteilt.

Die Wirkdauer von Gleitgelen ist zeitlich begrenzt und beträgt nicht mehr als eine Stunde.

### Anwendungsbeschränkungen

Gleitgelen darf nicht gleichzeitig mit Latex-Kondomen angewendet werden, da die Reißfestigkeit und Dichtigkeit dieser Kondome vermindert werden kann, so dass deren Schutzwirkung nicht mehr gewährleistet ist.

### Hinweise zur Haltbarkeit und Aufbewahrung

Das Verfallsdatum ist auf der Lasche der Verpackung bzw. auf dem Tubenfalz aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Medizinprodukt nicht mehr nach diesem Datum! Dieses Datum gilt auch für die angebrochene Tube.

Gleitgelen ist unzugänglich für Kinder aufzubewahren.

### Packungsgrößen

Tube mit 50 g

### Herstellung und Vertrieb

Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld

Telefon: 0521/880805; Telefax: 0521/8808334

Internet: [www.wolff-arzneimittel.de](http://www.wolff-arzneimittel.de); E-Mail: [info@wolff-arzneimittel.de](mailto:info@wolff-arzneimittel.de)

### Stand der Information

April 2005