



SpeediCath Compact

gebrauchsfertiger beschichteter Katheter,
Länge Katheterschaft: ca. 7 cm, Länge Katheter inklusive Griff: ca. 14 cm

GRÖSSE	R
	Katheter Natrium Fruen
OH	 ♀
8	28578
10	28580
12	28582
14	28584

SpeediCath Compact Konnektor

zum Anschluss eines Urinbeutels an SpeediCath Compact Einmalkatheter

	
Alle OH	28590

Coloplast GmbH
Postfach 700340
22003 Hamburg

Tel: 0 40 / 66 98 07-77
devks@coloplast.com
www.speedicath.de
www.coloplast.de




Coloplast and SpeediCath are registered trademarks of Coloplast A/S
or related companies. © 2006.11. All rights reserved.
Manufacturer: Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.



SpeediCath Compact

Der kompakte gebrauchsfertige beschichtete Einmalkatheter für Frauen

Gebrauchsanweisung

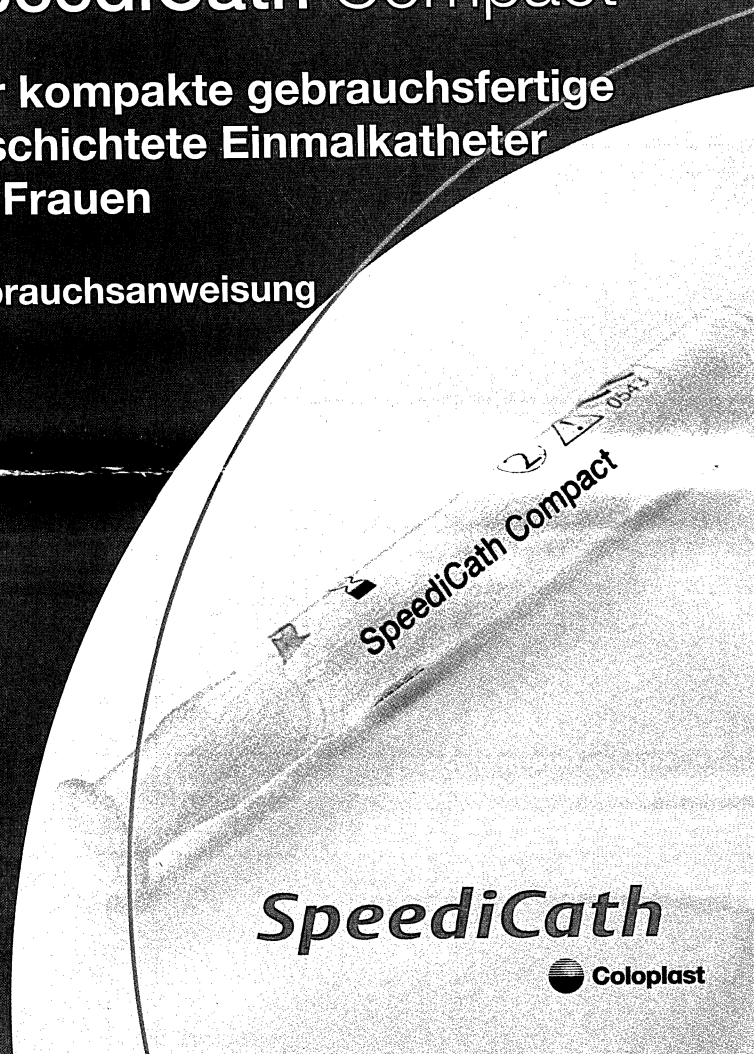

SpeediCath

 Coloplast

SpeediCath Compact

SpeediCath Compact ist ein hydrophiler Katheter speziell für Frauen.

Der kompakte, beschichtete Katheter ist PVC-frei und liegt gebrauchsfertig in einer sterilen Flüssigkeit.

Bitte beachten:

Intermittierende Selbstkatheterisierung ist bei einer neurogenen Blasenfunktionsstörung eine anerkannte und zuverlässige Methode zur Entleerung der Blase. Auch die Katheterisierung mit dem **SpeediCath Compact** sollte nur nach Anweisung eines Arztes, nach fachlicher Anleitung und gemäß dieser Gebrauchsanweisung durchgeführt werden.

Im Falle eines Harnwegsinfektes mit Symptomen wie Fieber, Unwohlsein beim Entleeren der Blase, ständigem Bedürfnis, die Blase zu entleeren oder Blut im Urin, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

SpeediCath Compact ist so entwickelt worden, dass das Katheterisieren auf der Toilette durchgeführt werden kann.

Einige Frauen haben möglicherweise das Gefühl, dass sich ihre Blase mit dem **SpeediCath Compact** nicht vollständig entleeren lässt. Wenn Sie das Gefühl haben, dass sich die Blase mit dem **SpeediCath Compact** nicht wie gewohnt entleeren lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Bei beschädigter Versiegelung oder bei anderweitiger Beschädigung des Katheters, darf das Produkt weder verwendet noch erneut sterilisiert werden.

Die Flüssigkeit, in der der Katheter liegt, ist unbedenklich, kann jedoch Flecken beim Kontakt mit der Kleidung hinterlassen. Die Verpackung sollte daher vorsichtig geöffnet werden.

Lagerung bei Raumtemperatur. Eine Lagerung bei extremen Temperaturen (unter 0°C und bis 60°C) bis zu 24 Stunden, beeinträchtigt die Funktion des Katheters jedoch nicht.

SpeediCath Compact ist nur für den Einmalgebrauch geeignet und muss anschließend entsorgt werden.

Für Schäden, die bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch von **SpeediCath Compact** Einmalkathetern entstehen, kann Coloplast keine Haftung übernehmen.

Die Anwendung von SpeediCath Compact

Desinfizieren Sie bitte zuerst die Hände und anschließend den Genitalbereich. Es ist wichtig, eine Bakterienwanderung von Händen oder Genitalien auf den Katheter zu verhindern. Katheterisieren Sie sich auf der Toilette sitzend oder vor der Toilette stehend.

SpeediCath Compact ist in eine sterile Flüssigkeit gebettet. Bevor Sie den Katheter öffnen, stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind mit der Katheterisierung zu beginnen.

1. Halten Sie den Katheter vertikal mit dem Griff nach unten, indem der farbige Pfeil auf der grünen Verpackung nach unten zeigt.

2. Brechen Sie die Versiegelung auf, indem Sie vorsichtig die beiden ineinander gesteckten Röhrrchen in die entgegengesetzte Richtung drehen.

3. Ziehen Sie die Röhrrchen langsam auseinander. Das äußere Röhrrchen ist der Kathetergriff, in dem anderen Röhrrchen befindet sich die sterile Flüssigkeit.

4. Um den Katheter freizulegen, halten Sie den Kathetergriff fest und ziehen Sie das andere Röhrrchen vorsichtig ab. Dabei rastet der Katheter spürbar ein. Entsorgen Sie das Röhrrchen ohne Katheter in einen Müllbehälter oder entleeren Sie die Flüssigkeit aus dem Röhrrchen für eine spätere diskrete Entsorgung des gebrauchten Katheters. Der Katheter ist nun einsatzbereit.

5. Spreizen Sie die Schamlippen mit der einen Hand, um den Harnröhreingang leichter zugänglich zu machen. Mit der anderen Hand führen Sie jetzt den Katheter langsam in die Harnröhre ein, ca. 2cm auf einmal. Bevor der Katheter die Blase erreicht, fühlen Sie evtl. einen geringen Widerstand des Schließmuskels.

Schieben Sie den Katheter soweit in die Blase bis Urin fließt. Wenn der Urin nicht mehr fließt, ziehen Sie den Katheter langsam heraus. Entsorgen Sie nun den Katheter direkt in einen Abfallbehälter oder stecken Sie das innere Röhrrchen für eine diskrete Entsorgung auf den Katheter zurück. Nun können Sie den Katheter in einen Abfallbehälter entsorgen.

